

先生各位

急速凝固採血管の使用における 「アスペルギルス抗原」測定についてのご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ニプロ株式会社より、下記検査項目におきまして、ニプロ株式会社製の急速凝固採血管で採血した検体を測定した際、測定値が上昇し、偽高値となることが確認された旨の連絡を受けましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

つきましては、当該検査をご依頼の際は、下記の急速凝固採血管のご使用は避けて、一般採血用容器（総合検査案内掲載容器/容器番号01又は02）をご利用いただきますようお願い申し上げます。

先生方にはご迷惑をお掛けすると存じますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■対象項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目
56	2432 5E148	アスペルギルス抗原

■該当管種

ニプロ社 ネオチューブRCシリーズ(RC-SH、RC-ST)
ニプロ社 フリーチューブRC
※共にキャップ色は黄色

■現象

バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社製アスペルギルスキット「プラテリア アスペルギルス Ag EIA」を使用したアスペルギルス抗原の測定値が上昇し偽高値となることが確認されました。これは該当管種に使用している添加物(ゼラチン)が影響すると推測されています。

■対応

上記項目を測定の場合、採血にあたっては該当管種のご使用をお避け下さい。
アスペルギルス抗原測定のための採血にあたっては一般採血用容器(総合検査案内掲載容器/容器番号01又は02)をご使用ください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。