

新規検査受託のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、新たに受託を開始いたしますので、ご利用いただきたくご案内申し上げます。

謹白

記

■受託開始日 2021年 10月 11日（月）より受託開始

■新規受託項目内容一覧

項目コード 統一コード	検査項目	判断料 実施料	採取量(mL) 必要量(mL)	採取容器 提出容器	保存	検査方法	基準値	所要日数	備考
9082 5F625	SARS-CoV-2抗体IgG(S)	未収載	血液 2 血清0.5	01 21	冷蔵	CLIA法	(-) 50.0 AU/mL未満	2~3日	*00

判定基準

測定値(AU/mL)	判定
50.0未満	(-)
50.0以上	(+)

●SARS-CoV-2抗体IgG(S)

SARS-CoV-2ウイルスは、細胞上の受容体に結合することで体内に侵入します。このウイルスにはヌクレオカプシドタンパク質(N)やスパイクタンパク質(S)などの種類があります。その中でスパイクタンパク質に対する抗体(IgG抗体(S))は新型コロナウイルスに感染あるいはワクチン接種により中和抗体が産生された可能性を調べることができます。

- *1 本検査は、血清中のIgG型SARS-CoV-2抗体(スパイクタンパク質S1サブユニット受容体結合ドメインに対するIgG型抗体)の検出又は測定をします。
- *2 本検査は研究用試薬であり、この製品で得られた結果の臨床的有用性については確立されていないため、診断等の目的では使用することはできません。
- *3 本検査は保険適用外です。

■他社試薬との相関

		他社試薬		
		+	-	計
新試薬	+	41	6	47
	-	0	3	3
	計	41	9	50

陽性一致率： 87.2%
陰性一致率： 100.0%
判定一致率： 88.0%
(社内検討資料より)

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。